



1. Vänd på hjärtstartaren så att du ser baksidan



2. Använd ett mynt eller liknande för att trycka in de två låsmekanismerna så att locket öppnas.



3. Lyft bort locket och ta bort batterierna. Sätt i de nya, var noga med att polerna placeras som de ska.



4. När sista batteriet sätts i kommer hjärtstartaren att uppmana dig att trycka på återställningsknappen.

Tryck på knappen inom 15 sek från att hjärtstartaren säger "om batterierna är nya, tryck på knappen".

Om elektroder inte är inkopplade kommer hjärtstartaren att säga "anslut kabel".



5. Sätt tillbaka locket.



6. Kontrollera att en grön bock syns i rutan på framsidan.